

ottobock.

Manchons Caleo

Quality for life

Manchons Caleo

Le manchon a un impact considérable sur l'efficacité d'un appareillage prothétique. Les utilisateurs ne réclament pas seulement un haut niveau de protection et une excellente adhérence, mais aussi un haut niveau de confort.

Les manchons de la gamme Caleo libèrent une huile minérale de qualité médicale qui protège et nourrit la peau. Fabriqués à partir d'un matériau thermoformable et souple, les manchons Caleo peuvent être adaptés parfaitement, pour un confort maximal.



Thermoformables

Les manchons copolymères Caleo sont thermoformables, ce qui permet aux orthoprothésistes de les adapter au membre résiduel de l'utilisateur. Cela peut s'avérer très utile, par exemple, si la forme du moignon est légèrement conique. Il suffit d'appliquer le manchon sur un moule en plâtre sec, de l'entourer d'un bandage élastique (si nécessaire), puis de le chauffer dans un four à chaleur tournante (6Y90/6Y92 : 2 heures à 70 °C ; 6Y93/6Y95 : 15 minutes à 65 °C).

Manchons de la gamme Caleo

Les manchons Caleo libèrent une huile minérale qui nourrit la peau. L'excellente qualité de leur matériau en fait la solution idéale pour les utilisateurs dont la peau est sensible.

Thermoformables, tous les manchons s'adaptent sur mesure à la forme du membre résiduel, pour un maximum de souplesse, de douceur et de confort.

Les manchons Caleo sont lauréats d'un iF Design Award récompensant la conception exceptionnelle du produit.



Caleo 6Y90/6Y92

Facile à mettre en place, extrêmement durable

Grâce à un matériau de haute qualité, souple et résistant.

Confort maximal

La matrice intégrée à la partie distale du manchon élimine toute traction désagréable sur le moignon pendant la phase d'oscillation.

Versions

Disponible avec accrochage distal (6Y90) pour les utilisateurs ayant un niveau d'activité 2 ou sans (6Y92) pour le niveau d'activité 3.



Caleo 3D 6Y93

Protection et maintien

La forme 3D protège les structures osseuses grâce à ses 6 mm d'épaisseur à l'avant. Le matériau de 3 mm d'épaisseur à l'arrière facilite la flexion du genou.

Facile à mettre en place, extrêmement durable

Grâce à un matériau de haute qualité, agréable et résistant.

Versions

Disponible avec accrochage distal (6Y93=L) pour les utilisateurs ayant un niveau d'activité 1-2 et sans accrochage distal (6Y93=C) pour le niveau d'activité 2-3.



Caleo 3D 6Y95

Durabilité extrême

Le copolymère haute qualité garantit une durabilité et une résistance à l'usure. La solution idéale pour tous les utilisateurs.

Protection et maintien

La zone de flexion (à l'avant) facilite la flexion du genou et réduit les contraintes sur la rotule. La forme 3D éprouvée assure également une protection et un maintien parfaits.

Réduction du pistonnage

Le textile mono-élastique offre un degré élevé d'élasticité latérale, pour plus de flexibilité et d'adaptabilité, tandis que l'extension longitudinale et, par conséquent, le pistonnage, sont nettement réduits.

Cupule souple

La cupule 3D avec partie distale striée est nettement plus souple et s'adapte parfaitement à l'extrémité distale du moignon.

Versions

Disponible avec accrochage distal (6Y95=L) pour les utilisateurs ayant un niveau d'activité 2 et sans accrochage distal (6Y95=C) pour le niveau d'activité 3-4.



Caractéristiques techniques

Caleo



Caleo 3D



Référence	6Y90	6Y92	6Y93=L6*	6Y93=C6*
Niveau d'amputation	transtibiale (TT)		transtibiale (TT)	
Accrochage distal	✓	✗	✓	✗
Revêtement textile	✓	✓	✓	✓
Épaisseur du matériau	3 mm		avant 6 mm, arrière 3 mm	
Emboîture	conception spécifique ou emboîture de contact total		conception spécifique ou emboîture de contact total	
Matrice	✓	✗	✗	✗
Tailles (circonférence distale)	200 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm		4 cm depuis partie distale	
			30 cm depuis partie distale	
	min	max	min	max
S	150	260	200	330
M	180	310	230	410
MP	200	310	330	500
L	230	350	360	560
LP	280	430	400	630
XL	330	500	430	690
Exemple de commande	6Y90=280	6Y92=280	6Y93=L6-M	6Y93=C6-M

Caleo 3D



6Y95=L6*

6Y95=C6*

transtibiale (TT)



avant 6 mm, arrière 3 mm

conception spécifique ou emboîture de contact total

intégrée au textile

4 cm depuis partie distale 30 cm depuis partie distale

min max min max

S 150 260 200 330

M 180 310 230 410

MP 200 310 330 500

L 230 350 360 560

LP 280 430 400 630

XL 330 500 430 690

6Y95=L6-M

6Y95=C6-M

Combinaisons recommandées

Pour un résultat optimal, nous recommandons les combinaisons suivantes :

Niveau d'activité	Utilisateurs moyennement actifs			Utilisateurs actifs
	1	2	3	
Manchon Caleo (avec accrochage distal)		6Y90		
	6Y93=L			
		6Y95=L		
Manchon Caleo (sans accrochage distal)			6Y92	
		6Y93=C		
				6Y95=C
Suspension	6A40 MagnoFlex Lock		Soupape 4R140	
	Gaine de protection 453A30/A40 ProFlex			
Pied	1C11 Terion	1C30 Trias	1C60 Triton	
			1B1 Meridium	
		1C66 Triton Smart Ankle		

Fabricant Otto Bock Healthcare.

Dispositif médical de classe I pris en charge par les organismes d'assurance maladie sous la référence VI6X604.

Lire attentivement la notice d'utilisation.

Otto Bock France

4 rue de la Réunion - CS 90011

91978 Courtaboeuf Cedex

T +33 (0) 1 69188830 · F +33 (0) 1 69071802

information@ottobock.fr · www.ottobock.fr